

<DJM-PLUSⅢ用 新元号対応アプリケーション更新手順書>

【はじめに】

- ・ 本体端末が DJM-PLUSⅢ（右図）であることを確認してください。
- ・ USB メモリは本体に複数個接続しないでください。

DJM-PLUSⅢ



1. <https://www.wink-kousin.jp/> へアクセスし、
[医療用医薬品処方監査システム] 画面を表示します。
2. トップ画面の【データダウンロード】ボタンをクリックすると、User ID、Password の
入力画面が表示されます。 User ID、Password を入力し、[Login] ボタンを押します。



【User ID/Password について】

User ID : plus3newera

Password : plus3123


3. [HOME] 画面が表示されます。
右上の【BizDrive】タブをクリックします。




4. [ルートフォルダ一覧] 画面が表示されます。
【DJM-PLUSⅢ専用新元号対応アプリケーション】をクリックします。




5. [DJM-PLUSⅢ専用新元号対応アプリケーション] 画面が表示されます。
[Balance フォルダ] の横のチェックボックスにチェックを入れ、ダウンロードボタンを押します。
ファイルを一旦 PC 上に保存します。
お使いの PC の OS によって画面が異なります。

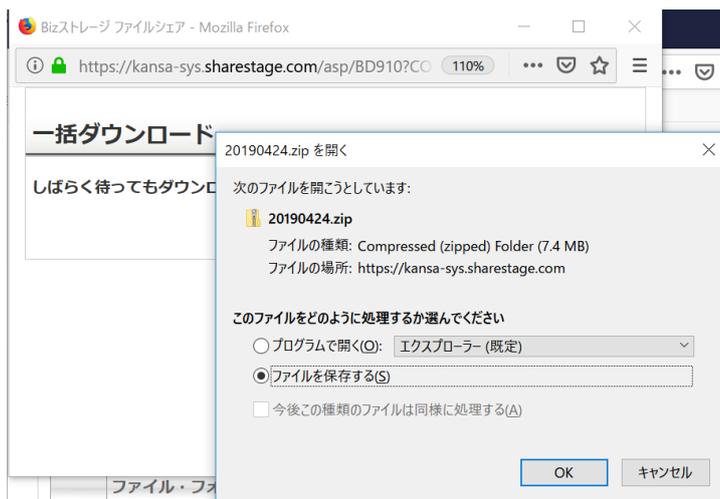


6. ダウンロードした [Balance フォルダ] をコピーします。

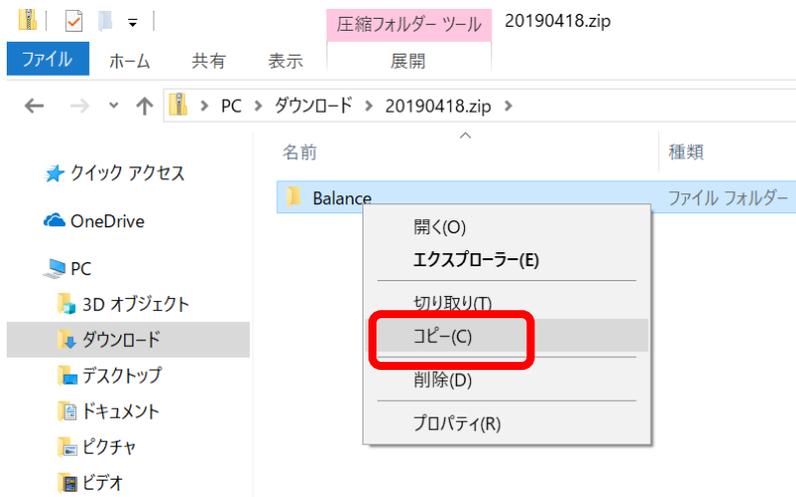

7. USBメモリの直下に【Balance】フォルダを格納します。

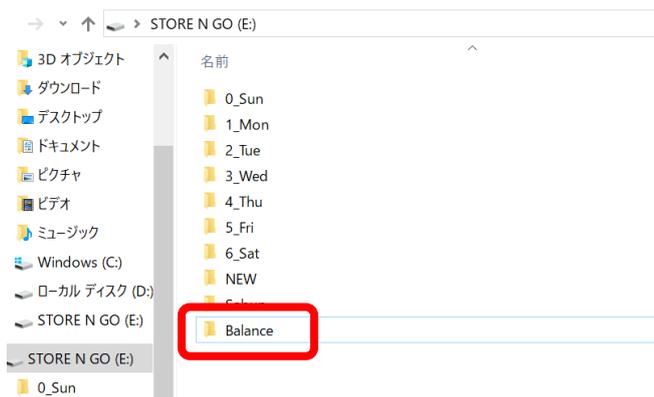


※ 念の為 Balance フォルダをダブルクリックして、5つのフォルダと2つのファイルが入っているか確認してください。(USBメモリ直下 Balance フォルダの1つ下の階層)

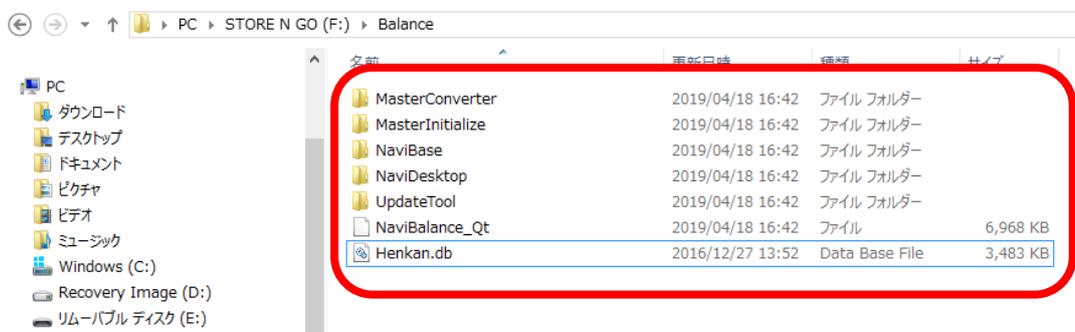

8. 監査システムをシャットダウンし、更新ファイルが入った USB メモリを接続します。


※ 本体に USB メモリを複数個接続しないでください。

9. 本体を起動し、【メイン画面】表示後、下記の通り順番に画面タッチします。

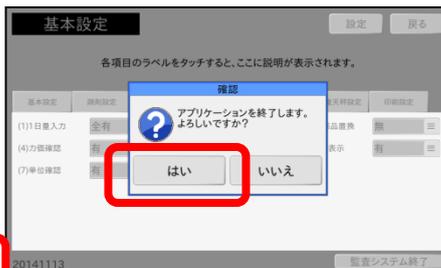

10. 下記画面が表示してから5秒程放置し、更新ツールを起動してください。

※ パスワードを聞いてきた場合は「1330」と入力してください。

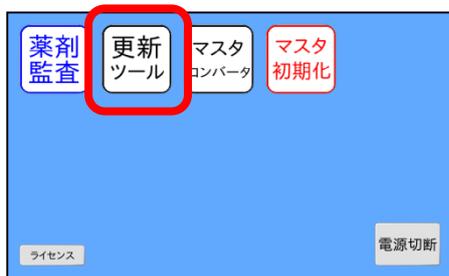

11. [アプリケーション更新]ボタンを押し、アプリケーションの更新が終わるまでお待ちください。




12. 更新が終了するとメッセージが表示されます。

[OK]ボタンを押します。



13. [更新ツール終了] ボタン、[薬剤監査] ボタンを順に押してください。

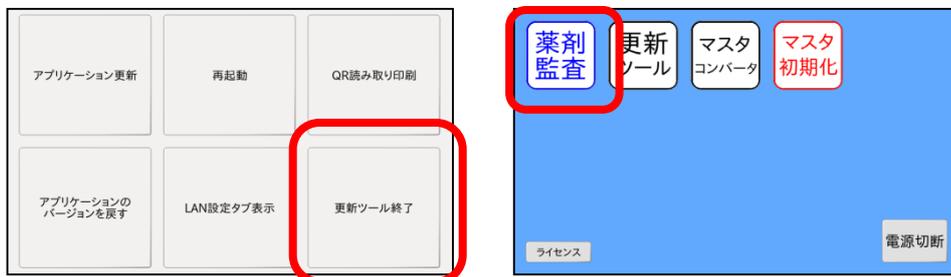

14. アプリケーション起動後、動作テストをお願い致します。

以上